

# CEFAR FEMINA

CEFAR FEMINA nykynaiselle, ennen ja jälkeen synnytyksen - tai sen aikana. CEFAR FEMINAlla poistat tehokkaasti kipua synnytyksen aikana ilman sivuvaikutuksia sinulle tai vauvallesi. Se sopii hyvin myös raskauden aikaisten tai sen jälkeisten ongelmien hoitoon, kuten turvonneisiin jalkoihin, niska-hartiasärkyihin ja lihasten aktivointiin. CEFAR FEMINA on kaksikanavainen stimulaattori, jossa on viisi valmista ohjelmaa.



## TEKNISET TIEDOT - CEFAR FEMINA

Kanavien lukumäärä	2
Hoitovirran teho/kanava	0-60 mA
Valmiiden ohjelmien lukumäärä	5
Stimulointitapa	Konventionaalinen TNS (HI), Moduloitu TNS, Vaihtelevataajuuksinen stimulointi, Vaihtelevataajuuksinen stimulaatio aktiivisella levolla (NMES)
Pulssin pituus	300 µs
Taajuus	80 Hz
Virtalähde	2 kpl 1,2 V ladattavia AA-paristoja tai 2 kpl 1,5 V kertakäyttöparistoja
Koko (l x k x s)	120 x 50 x 30 mm
Paino	n. 180 g

## Taustavalo

Suuri näyttö ja taustavalo helpottavat laitteen käyttöä tilanteissa, joissa ympäristön valo ei riitä.

## Vianetsintä

Laitte on turvallinen käyttää, sillä se valvoo toimintojaan automaattisesti. Vika piirilevyssä estää käytön, ja virhesymboli näytöllä osoittaa huollon tarpeen.

## Ajastin

Hoitoaika on säädettävissä 0-60 min (esiasetus 30 min, paitsi P1-ohjelmassa). Ohjelmia voi käyttää myös manuaalisella ajan säädöllä.

## Näppäinlukko ja hoidon keskeytys

Näppäinlukko menee automaattisesti päälle, jos et ole 10 sekuntiin koskenut näppäimiin. Lukitus tekee hoitohetkistä turvallisia, sillä se estää tahattoman virranvoimakkuuden säädön kesken hoidon.

Voit pitää tauon hoidossa milloin vain painamalla P-näppäintä. Jos ohjelma on keskeytetty yli 5 min ajaksi, laitteen virta katkeaa automaattisesti.

## Käyttöohje

Käyttöohje tarjoaa selkeitä ohjeita siitä, mikä ohjelma on paras mihinkin ongelmiin. Ohjeessa on myös tietoa eri stimulaatiomuodoista. Havainnolliset kuvat elektrodien asettelusta helpottavat sinua löytämään tehokkaimman hoitomuodon.

**Usmin Fysioterapiapalvelu Oy,**  
Mustankiventie 43, 05800 Hyvinkää,  
puh. (019) 437 057, fax. (019) 437 077,  
www.usmin.com, info@usmin.com